

UNI info

ŽIEMA 2020-2021

MIELI BIČIULIAI,

Džiaukimės ateinančiomis šventėmis ir gyvenimu, nors nematomi mikroskopiniai priešai ir labai jį pakeitė.

Pasitikime Naujuosius 2021-uosius atviri pokyčiams ir pasiruošę įveikti visus iššūkius!

Saugokime vieni kitus ir draugaukime,

Visada šalia Jūsų Unidentas

ŠIAME LEIDINYJE:

- YPATINGI ŽIEMOS IR ŠVENTINIAI PASIŪLYMAI – TIK UNIDENTE
- TOKUYAMA (JAPONIJA) KOMPOZITAI – ESTELITE, OMNICHROMA - PATOGIAM IR KOKYBIŠKAM DARBUI
- DR. JORDI MANAUTA (ITALIJA) STRAIPSNIS APIE PRAKTINĮ ESTETINĮ PLOMBAVIMĄ
- SVARBIAUSIŲ GAMINTOJŲ INFORMACIJA (DENTSPLY SIRONA, 3M, GC, VOCO, COLTENE)
- LIPOSOMINIS VITAMINAS C – JŪSŲ SVEIKATAI IR GROŽIUI



OMNICHROMA – tai vieno atspalvio kompozitės tinkantis visų spalvų nuo A1 iki D4 bei baltintų dantų restauracijoms!

- Išskirtinis atspalvio atitikimas dėka naujos „Smart Chromatic Technology“ technologijos, sukurtos Tokuyama mokslininkų, kuri visiškai keičia atspalvių pritaikymo procedūrą, plombuojant dantis kompozitais.
- Ypatingai geros poliravimo savybės
- Puikios fizinės-mechaninės savybės
- Nelimpa prie instrumentų
- Pakankamas modeliavimo laikas
- Baltą opakinę spalvą iki sukietinimo suteikia puikų matomumą modeliuojant

- Minkšta kreminė konsistencija – puiki adaptacija prie sienelių
- Sudėtyje nėra Bis-GMA – sumažinta alergijų rizika
- Spalvos stabilumas
- Labai greitas darbas, paprastas administravimas: tik vieno atspalvio kompozitės, tinkantis visiems atvejams ir vienos papildomos komponentės „blokeris“ ypatingiems atvejams (intensyvios diskoloracijos, metaliniai elementai, etc.)

Kaina
65⁰⁰ €

**OMNICHROMA
OMNICHROMA BLOCKER**
švirkštės [4 g]

Kaina: 65,00 Eur

Kaina
65⁰⁰ €

**OMNICHROMA
OMNICHROMA BLOCKER**
kapsulės [20 x 0.2 g]

Kaina: 65,00 Eur



ESTELITE KOMPOZITŲ ŠEIMA

ESTELITE ASTERIA

- Nesudėtingas sluoksniavimas, supaprastinta 2 sluoksnių koncepcija.
- Lengva parinkti spalvą. Estelite Asteria tik 7 "Body" ir 5 emalio spalvos apima visą dantų spalvų skalę!
- Minimalus spalvos ir skaidrumo pokytis prieš ir po polimerizacijos
- Ypatingai mažai trūkiasi [1,3%]
- Lengva dirbti. Nelimpanti ir skulptūriška, ilgas darbo laikas [90sek., kai aplinkos šviesa 10 000lux].
- Puiki estetika, nematomos ribos, natūralus skaidrumas, ilgalaikis blizgesys.

ESTELITE SIGMA QUICK

- Ilgalaikis restauracijos blizgesys
- Mažas restauracijos nusidėvėjimas
- Puikus chameleono efektas, užtenka 10 spalvų.
- Minimalus tūrinis susitraukimas [1,3%], sumažintas polimerizacinis stresas ir pooperacinis jautrumas.
- Geras kraštinis atitikimas.

ESTELITE COLOR

- Mažo klampumo, šviesa kietinami dažai estetiniam plombavimui
- Tepami po arba tarp kompozito sluosnių
- 9 spalvos - Clear, Blue, Gray, Lavender, Yellow, Ochre, Dark Brown, Red, White
- 4 opakieriai - Pink Opaque, Low Chroma Opaque, Medium Chroma Opaque, High Chroma Opaque

Kaina
60⁰⁰ €

ESTELITE ASTERIA
švirkštės [4 g]
Kaina: 60,00 Eur



Kaina
40⁰⁰ €

ESTELITE SIGMA QUICK
švirkštės [3,8 g]
Kaina: 40,00 Eur



Kaina
55⁰⁰ €

ESTELITE COLOR
švirkštės [0,5 ml/0,9 g]
Kaina: 55,00 Eur



Perkant **3M** Science.
Applied to Life.™

odontologinių medžiagų* už
190,00Eur (suma su PVM)
nuo 2020.11.03 iki 2020.12.10

*išskyrus anestetikus

DOVANA

didelis ir šiltas
išskirtinės kokybės
šalikas



*Būkite energingi,
sveiki ir laimingi*

UNI
DENTAS

3M Science.
Applied to Life.™

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidentą vadybininkus
tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

3M™ Filtek™ Supreme takus ir Filtek™ Bulk Fill takus pateikiami naujuose ergonominiuose švirkštuose, dar patogiau ir lengviau aplikuojami.



- Praktiškai nėra burbuliukų ar medžiagos nutekėjimų
- Lengvai sulenkama kaniulė, kad patogiai pasiektumėte
- Dėl ergonomiško švirkšto dizaino lengva laikyti ir išspausti
- Tinka daugeliui indikacijų ir metodų





Filtek™

Supreme
Flowable Restorative

Kodėl vienas atspalvis?

Vieno atspalvio kompozitų naudojimo privalumas yra tai, kad atlikdamas danties atstatymo procedūrą odontologas gali skirti daugiau dėmesio formos atkūrimui, kas yra itin svarbu galutiniam estetiniam rezultatui.

Iššūkis

Pacientas buvo nepatenkintas ortodontinio gydymo bei po jo atliktų restauracijų rezultatais, todėl pageidavo estetinio vaizdo pagerinimo. Šio kompleksinio gydymo pirmieji etapai - diagnostika bei estetikos įvertinimas.

Rezultatai

Naudojant tik vieno atspalvio kompozitus – takųjį 3M™ Filtek™ Supreme Flowable ir universalų 3M™ Filtek™ Universal, abu A2 atspalvio (kompozitai sukurti taip, kad atspalviai identiškai dera), buvo galima skirti daugiau dėmesio anatomicinės formos atkūrimui bei restauracijos apdailai ir poliravimui, todėl gautas itin geras estetiškas rezultatas.



Klinikinis atvejis
Dr. Jordi Manauta

Sudėtingų klinikių atvejų sprendimas naudojant vieno atspalvio kompozitus



Detalus klinikinio atvejo aprašymas - kituose puslapiuose



Apie Dr. Jordi Manauta

Meksikoje gimęs dr. Jordi Manauta baigė Meksikos technologijos universitetą (UNITEC), kur įgijo odontologo kvalifikaciją. Vėliau tęsė podiplomines studijas Tarptautiniame Katalonijos universitete (UIC) Barselonoje, kur gilinosi į estetinę odontologiją bei įgijo magistro laipsnį.

Šiuo metu dr. Jordi Manauta yra kvietinis profesorius Sienos universitete (Italija) ir Sevilijos universitete (Ispanija) bei praktikoja estetinę ir konservatyvią odontologiją privačiai Santa Margherita Ligure (Italija).

Dr. Jordi Manauta bendradarbiaudamas su tarptautinėmis kompanijomis, pateikė įvairių pasiūlymų tobulinant medžiagas ir instrumentus, naudojamus estetinėje odontologijoje ir fotografijoje. Jis yra knygos „Sluoksniai: kompozicinių dervų sluoksninimo atlasas“ (“Layers: An Atlas of Composite Resin Stratification”, Quintessence, 2012) bendraautorius, įvairių straipsnių tarptautiniuose žurnaluose autorius arba bendraautorius bei mokslinis konsultantas dviejuose Europos žurnaluose.

Detalus klinikinio atvejo aprašymas



Pav. 1: Estetinis vaizdas prieš procedūrą.



Pav. 2: Praėjus trims mėnesiams po klinikinio vainiko prailginimo operacijos, pacientas yra paruoštas planinėms restauracinėms procedūroms.



Pav. 3: Gydomo dieną buvo parinkta spalva, naudojant „tiesioginio pavašavimo“ kompozitu metodiką, kai ant vidurinio danties trečdaliai dedami įvairių atspalvių kompozito gabalėliai ir fotografuojama, naudojant poliarizuojantį filtrą.



Pav. 4: Kitas atspalvio parinkimo būdas yra „bandomasis plombavimas“, kurio metu kompozitas „išbandomas“ jo nekietinant, tik imituojant būsimos restauracijos sluoksnio storį, skaidrumą ir spalvą. Svarbu, kad šios procedūros metu dantys išliktų drėgni, nes išdžiūvusių dantų spalva pakinta, jie tampa baltiesni.



Pav. 5: Izoliavimas koferdamu yra būtinas, siekiant sėkmingai atlikti šią restauravimo procedūrą. Koferdamo naudojimas yra pranašesnis už kitus izoliavimo būdus, nes sudaro tinkamas sąlygas išlaikyti sausą darbinį lauką, kurio reikia atkuriant išnirimo kontūrą danties kaklelio srityje. Esanti sena restauracija apdorojama smėliasrove 29 mikronų aliuminio oksido srove.



Pav. 6: Rišamieji paviršiai ėsdinami geliu 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant. Ėsdinimo gelis po 15 sekundžių nuplaukamas vandeniu. Po to aplikuojamas surišiklis 3M™ Single Bond Universal Adhesive, kuris įtrinamas į paviršių 20 sekundžių, nupučiamas švelnia oro srove bei kietinamas šviesa 10 sekundžių.



Pav. 7: Danties kaklelio kontūro, išnirimo profilio bei danties kontūrų sukūrimui buvo naudojama „priekinio sparno“ technika. Galutiniam atstatymui buvo naudotas mažo susitraukimo ir puikiai poliruojamas kompozitas (3M™ Filtek™ Universal Restorative).




Pav. 8: Nuėmus matricą, koreguojami danties kontūrai iš abiejų pusių - mezialiai ir distaliai. Pirminė kompozito restauracijos apdaila yra labai naudinga prieš pradėdant gretimo danties atstatymą, nes tai leidžia pamatyti labai mažus paviršiaus defektus, kurie šiame etape lengvai pataisomi.



Pav. 9: Pirminė kompozito restauracijos apdaila yra labai naudinga prieš pradėdant gretimą danties atstatymą, nes tai leidžia pamatyti labai mažus paviršiaus defektus, kurie šiame etape lengvai pataisomi.



Pav. 10: Mano patirtis rodo, kad smulkius defektus lengviau taisyti takiuoju kompozitu (šiuo atveju 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative), o didesnius defektus - universaliais arba storo sluoksnio įprastinio, "pastos" klampumo kompozitais.

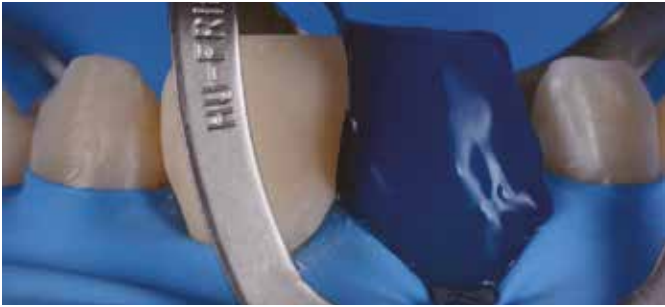

Pav. 11: Matrica naudojama siekiant apsaugoti gretimą dantį, kai aplikuojamas esdinimo gelis 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant. Kadangi apsauginė matrica nebuvo deformuota, ją galima pakartotinai naudoti interproksimalinei anatomijai atkurti.



Pav. 12: Užbaigus formuoti danties kaklelio bei proksimalinius kontūrus, vestibulinis paviršius modeliuojamas plačiu instrumentu, sukurtu specialiai tiesioginiams vėneringams (SOLO Anterior, LM instrumentai, Suomija).



Pav. 13: Vestibulinis paviršius baigiamas formuoti taikant "priekinio sparno" techniką. Jei tarpas labai siauras, tuomet yra paprasčiau iš pradžių naudoti takųjį kompozitą (3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative), po to jį padengiant įprastiniu universaliu kompozitu (3M™ Filtek™ Universal Restorative).



Pav. 14: Restauracijos vaizdas po matricos nuėmimo prieš apdailą. Kairiosios ilties ir premoliaro restauracijos buvo atliktos naudojant tą pačią techniką, kaip atstatant centrinius kandžius, daugiausia dėmesio skiriant formai ir kontūrams.



Pav. 15: Restauracijos vaizdas nuėmus koferdamą, bet dar neatlikus galutinės apdailos bei okliuzijos pritaikymo.



Pav. 16: Galutinis blizgesys buvo išgautas naudojant 2 etapų 3M™ Sof-Lex™ Diamond poliravimo sistemą. Atliekant konservatyvų tiesioginį atstatymą kompozitais, galima koreguoti restauracijų paviršių ir vėliau, jei to reikia. Metodika, kai naudojamas vieno atspalvio kompozitas, leidžia odontologui sutelkti dėmesį į anatominę formą bei apdailą, kas užtikrina labai gerą estetinę rezultatą.

3M

3M Odontologija

3M Lietuva, UAB
A. Goštauto g. 40A
Vilnius, LT-03163
+370 5 216 0780
www.3mlietuva.lt

Naudojant 3M odontologijos gaminius, prašome visada laikytis naudojimo instrukcijų nurodymų. Atspausdinta 3M Oral Care.
3M, "3M Science. Applied to Life." Filtek, Scotchbond and Sof-Lex yra 3M prekiniai ženklai. 3M Health Care Academy yra 3M paslaugų ženklas.
Prašom perdirbti.
© 3M 2020. Visos teisės saugomos.

BŪKITE SAUGŪS IR SAUGOKITE KITUS
Apsauginės priemonės odontologams [Visi gaminiai turi CE]

Kaina
50⁰⁰ €

PERKANT 5 DĖŽUTES
VIENKARTINIŲ
MEDICININIŲ KAUKIŲ
(5x50vnt)

Kaina 5X10,00 Eur



Kaina
70⁰⁰ €

PERKANT 5 DĖŽUTES VIENKARTINIŲ
NITRILINIŲ/LATEKSINIŲ
PIRŠTINIŲ
(5x100vnt)

Kaina 5X14,00 Eur



ARBA

PERKANT APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ UŽ 50,00EUR IŠ SĄRAŠO:

Kaukės (50vnt) – 10,00Eur
Apsauginiai skydai – 12,00Eur
Pirštinės (100vnt) – 14,00Eur

Chalatai (10vnt) – 22,00Eur
Batų apdangalai – 6,00Eur
Prijuostės (50vnt) – 6,00Eur

Kepuraitės (100vnt) – 7,00Eur
Antrankoviai (100vnt) – 7,00Eur

DOVANA

KN95 TIPO RESPIRATORIUS



ŽIEMOS PASIŪLYMAI

DEZINFEKCIŅĖS SERVETĖLĖS OPTIM 1

COLTENE
SciCanNUOLAIDA
10%Kaina
13⁵⁰€

- Pakuotėje 160 dezinfekcinių servetėlių
- Valo ir dezinfekuoja, pakankama 1 minutės kontaktinio laiko
- Švelnios, netoksišos, nedirgina akių, odos, kvėpavimo takų
- Tinka įvairiems kietiems, neporėtiems paviršiams bei medžiagoms
- Aktyvi medžiaga – vandenilio peroksidas, kuris skyla į vandenį bei deguonį, draugiškus apinkai
- Išbandytas ir patvirtintas, kaip tinkamas daugumos odontologinių kėdžių apmušalų valymui
- OPTIM 1 dezinfekcinės servetėlės efektyviai veikia net prieš sunkiai sunaikinamus patogenus, įskaitant COVID-19 (koronavirusas)

Kaina ~~15,00~~ Eur - 13,50 EurKaina
12⁰⁰€COTTON ROLLS
medvilniniai volėliai
(2000vnt)

Kaina 12,00 Eur

DOVANA COTTON ROLLS laikiklis
(1vnt)Kaina
12⁰⁰€SERVETĖLĖS
PACIENTUI
(500vnt)

Kaina 12,00 Eur

DOVANA Servetėlių laikiklis (1vnt)

Kaina
12⁰⁰€STERILŪS
SEILIŲ SIURBLIAI
(20vnt)

Kaina 12,00 Eur

DOVANA Seilių siurbliai (100vnt)

Kaina
6⁰⁰€VIENKARTINIAI
ŠVIKŠTAI 5ML
(10vnt)

Kaina 6,00 Eur

DOVANA Adatos kanalų plovimui
ENDO-TOP (10vnt)Kaina
12⁰⁰€DENTALINĖS ADATOS
DOCHEM
(100vnt)

Kaina 2X6,00 Eur

DOVANA konteineris panaudotoms
adatomis 1l (1vnt)Kaina
5⁰⁰€DĒLIONĒ VAIKAMS
„DENTAL PUZZLE“
(1vnt)


Kaina 5,00 Eur

DOVANA Lipdukas mažiesiems
pacientams (1vnt)Kaina
10⁸⁰€TOR MEDINIŲ
KAIŠČIŲ RINKINYS
(400vnt)

Kaina 10,80 Eur

DOVANA TOR medinių kaiščių
papildymas (100vnt)Kaina
13⁰⁰€TOR SEKCIJINIŲ
MATRICŲ RINKINYS SU
ŽIEDU (KODAS 1.198)

Kaina 13,00 Eur

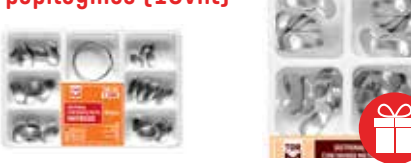DOVANA TOR sekcijinių matricų
papildymas (10vnt)Kaina
13⁶⁰€VEIDRODĖLIAI
NEDIDINANŲYS N4
(12vnt)

Kaina 13,60 Eur

DOVANA veidrodėlių
kotelis (1vnt)



Aquasil® Ultra+ Smart Wetting® Impression Material

- Hidrofiliskiausia atspaudinė medžiaga.
- Atspariausia atspaudinė medžiaga plyšimui.
- Įvairūs klampumo pasirinkimai ir skirtingi darbo laikai jūsų patogumui.
- Pilna sistema visoms indikacijoms ir atspaudų ėmimo technikoms.



Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo Dentsply Sirona atstovu!

Aquasil Ultra+ maišoma rankomis

2x 92€

PIRKINYS: 2x Aquasil Ultra+ putty XLV arba LV rinkinys

DOVANA: 1x Aquasil Ultra XLV/LV papildymas (2vnt. po 50ml)



2+1

+ DOVANA



Aquasil Ultra+ automatinis maišymas

198€

PIRKINYS: 1x Aquasil Ultra+ medium arba heavy DECA papildymas (2x380ml)

DOVANA: 1x Aquasil Ultra+ LV/XLV papildymas (2vnt. po 50ml)



1+1

+ DOVANA



CleanJoy® dantų valymo ir poliravimo pasta

TIESIOG PRAKTIŠKA

Indikacijos

Minkštų ir kietų paviršiaus apnašų pašalinimui
Taip pat spalvos pasikeitimo (pvz.: nuo kavos, arbatos ar tabako) pašalinimui

Dantų paviršių poliravimui prieš balinant arba po ortodontinio gydymo

Restauracijų valymui ir poliravimui

Laikino užpildo likučių pašalinimui



Rinkinio kaina tik 48,00Eur

Privalumai

- Stabili, vienalytė konsistencija
- Nėra pusrslų (2 000–3 000 aps / min)?
- Be parabenų
- Trijų grubumų
 - raudona (RDA 195) grubi – aukštas valymo pajėgumas,
 - geltona (RDA 127) vidutinė – vidutinis valymo pajėgumas,
 - žalia (RDA16) švelni – poliravimui
- Spalvinis kodavimas – raudona, žalia, geltona
- Galima naudoti su bet koku įprastiniu instrumentu (mažu šepetėliu, poliruokliu ir kt.)
- Sudėtyje yra fluoro (700 ppm) ir ksilitolio
- Trijų skonių: mėtų, karamelės, vyšnios

PUIKUS PASIŪLYMAS !

3-jų CleanJoy poliravimo pastų tūbelių rinkinys tik už 2-jų tūbelių kainą

2992 CleanJoy 3x100g vyšnių skonio

2993 CleanJoy 3x100g mėtų skonio

2994 CleanJoy 3x100g karamelės skonio

Ekonomiškas VOCO profilaktikos rinkinys

Rinkinio sudėtis:

- 2 x 100 gr. CleanJoy (127 RDA ir 16 RDA)
- 1 x 40 gr. Remin Pro
- 12 x 0.4 ml. Profluorid Varnish SingleDose (po 3vnt. šių skonių: melionų, karamelės, mėtų, vyšnių)
- 2 x 2 gr. Grandio Seal

Clean Joy - dantų valymo ir poliravimo pasta,

Remin Pro - apsauginis dantų kremas melionų skonio, sudėtyje yra fluoro [1450 ppm],

Profluorid Varnish – savaiminio kietėjimo lakas dantų jautrumui mažinti

Grandio Sel – baltos spalvos silantės:



Rinkinio kaina tik 86,00Eur

Grandio Seal INDIKACIJOS:

- vagelių ir duobučių padengimui/plombavimui,
- pažeisto emalio paviršių padengimui/atstatymui,
- padengimui karieso pažeistų zonų ortodontinio gydymo metu,
- kompozitinių arba cementinių plombų tarpelių padengimui (apsauginis sluoksnis nuo drėgmės),
- padengimui pieninių dantų.

Grandio Seal PRIVALUMAI:


- užpildas - neorganinis/nanohibridinis,
- fluoro kiekis [pagal svorį] - 1 % NaF ,
- užpildo kiekis -70,2 %,
- prisirišimas prie emalės -16,9 Mpa ,
- atsparumas skersinėms jėgoms -130 Mpa .

Paprastumas, estetika ir procesas - JŪSŲ rankose!

G-ænial® A'CHORD

Patobulintas universalus kompozitas
su lengvesniu spalvos pasirinkimu

Lengvam spalvos pasirinkimui **5 bazinės spalvos**
(A1, A2, A3, A3.5, A4) atstojančios 16 Vita spalvų.
Lengvas poliravimas ir ilgas blizgesio išlaikymas.

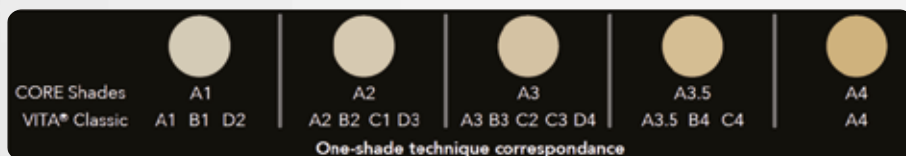

Papildomai A'CHORD
spalvų pasirinkime galite
rasti **du priekaklelinius**
atspalvius,
3 maskuojančias
opakines, **2 natūralaus**
skaidrumo emalio ir
2 balintų dantų spalvas
išraiškingai šypsena.



Natūrali fluorescencija bet
kokiame apšvietime!



Patogus modeliavimas - priekinių dantų srityje
su **šepetėliu**, galinių dantų srityje su
instrumentu, nelimpantis prie instrumento.

Nustebinkite savo pacientus šiuo supaprastintu sprendimu!

ŠVENTINIAI PASIŪLYMAI

Perkant **./'GC./**
medžiagų už 260,00Eur



DOVANA

100%
aukščiausios rūšies
vilnos pledas



Perkant **./'GC./**
medžiagų už 130,00Eur



DOVANA

sportinis
mikropluošto
rankšluostis



Būkite energingi, sveiki ir laimingi

Dėl išsamesnės informacijos
prašome kreiptis į Unidento vadybininkus
tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

UNI
DENTAS

./'GC./

HYGENIC Supaprastintas rinkinys su Elasti-Dam

H02900

- 36 × Elasti-Dam koferdamo guma, vidutinė, žalia, 6" × 6" (152 × 152 mm)
- 1 × Plastikinis rėmelis, 6" (152 mm)
- 1 × Fiesta spalva žymėti koferdamo žiedai be sparnelių, 4 vnt.
- 1 × Šablonas, 6"
- 1 × Lateksiniai tarpdantiniai siūlai, ploni, geltoni
- 1 × Koferdamo skylamušis
- 1 × Koferdamo repl

Kaina 260.00 €



HYGENIC Fiesta spalva žymėti Matte Finish koferdamo žiedai

HYGENIC Fiesta koferdamo žiedų rinkinys

- H09966 1 x 9 Fiesta spalva žymėtų koferdamo žiedų su sparneliais kompektas.
Pakuotėje yra šie koferdamo žiedai: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

Kaina - 135,00 €



HYGENIC Gloss Finish koferdamo žiedai su sparneliais



Galima uždėti koferdamo gumą, žiedus ir rėmelį vienu metu. Uždėjus ant rėmelio, guma užtempama ant žiedo sparnelių.

Kaina - 15,00 €

HYGENIC Gloss Finish koferdamo žiedai be sparnelių



Norėdami uždėti koferdamą, pirmiausia pritaikykite ir įtvirtinkite žiedą intraoraliai, po to užtempkite koferdamo gumą ant žiedo ir danties. Be sparnelių.

Kaina - 15,00 €

Ceram.x Spectra™ ST Effects

Sudėtingesnės priekinių dantų restauracijos.

Ceram.x Spectra™ ST

Jūsų dažniausi, kasdieniai atvejai.

Ceram.x Spectra™ ST flow

Takus estetiškas universalumas.

Susisiekite su savo Dentsply Sirona atstovu!

Efektyvi estetika su Ceram.x Spectra™ ST kompozitais

Mūsų įrodyta „SphereTEC®“ formulė dabar apima visą spektrą arba „Spectra“, atspalvių ir modeliavimo savybių, suteikiančių puikią pusiausvyrą tarp visko, kas svarbiausia gydytojams.

Puiki adaptacija ir modeliavimo savybės

➔ Modeliavimo metu sferinės dalelės sukuria "guolinį" efektą.

Sumaniai paprasta atspalvių sistema ir tikslus atspalvių atitikimas

➔ Puikus chameleono efektas dėl idealaus dervos ir užpildo santykio.

Patikimos mechaninės savybės ir nepriekaištingas blizgesys

➔ Unikali, iš anksto polimerizuota submikrono stiklo užpildo dalelių struktūra.


Sužinokite daugiau: dentsplysirona.com/CeramxSpectraST

Specialus pasiūlymas

3+1



Made possible by
SphereTEC® Technology

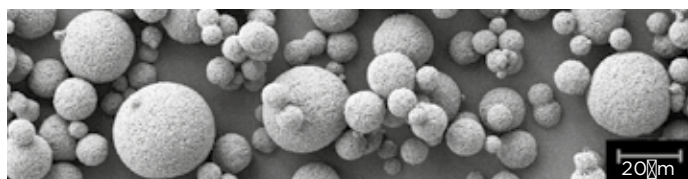

SEM image of SphereTEC® fillers

Arvydas Pilkauskas
Dentsply Sirona atstovas
Tel.: +37061940800
arvydas.pilkauskas@dentsplysirona.com

Altrient

Papildas sveikatai ir grožiui – liposominis vitaminas C (1000 mg)

98% absorbcija į kraujo apykaitos sistemą

Intraveninis poveikis naudojant "per os" (Dr. Thomas E. Levy)



- Palaiko imuninės sistemos funkcionavimą
- Skatina kolageno formavimąsi bei pagerina jo poveikį odai, kraujagyslėms, kaulams, kremzlėms, dantenoms ir dantims
- Palaiko normalų nervų sistemos funkcionavimą

- Padeda sumažinti nuovargio pojūtį
- Apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso
- Nedirgina skrandžio vartojant net didelėmis dozėmis

Geriausias būdas padidinti natūralią kolageno gamybą bei sumažinti ankstyvus senėjimo požymius

- Efektyviai įdrėkinama oda, sumažėja raukšlių bei padidėja odos elastingumas vos per 4 savaites*
- Odos elastingumas padidėja 60,8% per 12 savaitių ir 61,4% per 16 savaitių, vartojant 3 maišelius per dieną*

* Nepriklausomas dvigubai aklas placebo kontroliuojamas kliniškinis tyrimas, Prinstono vartotojų tyrimų centras (JK)



Pakuotės KAINA 47.00 Eur (perkant 5 pakuotes – 41.00 Eur x 5)

Pakuotėje – 30 vienkartinė dozių maišeliuose po 1000 mg liposominio vitamino C

Vartojimas: 1 – 3 dozės per dieną, supylus į vandenį, sultis arba jogurtą, geriausia – prieš valgį.

Netirpsta skysčiuose. **Nepilti į karštą vandenį!**

Kreiptis dėl užsakymo tel. 8 5 273 44 91

UNI
DENTAS